

TEST INFIEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO paskowe, 1 szt

cena: 20,89 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Infekcje układu moczowego to przypadłość, która często dotyka głównie kobiety ze względu na anatomiczne predyspozycje. Dyskomfort i ból odczuwany podczas infekcji znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Wskazaniem do wykonania testu będzie częstomocz, ból przy mikcji, ból podbrzusza, pieczenie w okolicy ujścia cewki moczowej czy parcie na mocz.

U kobiet w ciąży bardzo ważne jest, by wykrywać również bezobjawowy bakteriomocz, by wdrożyć jak najszybciej leczenie.

TEST INFIEKCJE DRÓG MOCZOWYCH pozwala na wczesne wykrycie infekcji i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, zwiększając tym samym szanse pacjenta na szybkie i skuteczne wyleczenie.

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1 saszetka z paskiem testowym
- 1 pojemnik na mocz
- instrukcja użycia

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. KIEDY WYKONAĆ TEST?

TEST INFIEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO należy wykonać w przypadku wystąpienia objawów takich jak: uczucie parcia na pęcherz przy jednoczesnej niemożności oddania moczu lub wydalaniu bardzo niewielkiej ilości moczu, piekący ból przy oddawaniu moczu, mocz mętny, o nieprzyjemnym zapachu, gorączka, złe samopoczucie, ból w okolicy lędźwiowej. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów można, jeszcze przed wizytą u lekarza, w warunkach domowych, zbadać mocz przy pomocy testu. Produkt przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych.

2. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS WYKONYWANIA TESTU?

Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia. W przypadku, gdy pasek testowy ulegnie

zamoczeniu lub zastosowano niewłaściwą ilość próbki, wynik badania może być nieprawidłowy. Wyniki zaleca się skonsultować z lekarzem prowadzącym.

3. KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY NA ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO?

KOBIETY: zakażenia układu moczowego to dolegliwość występująca częściej u kobiet niż u mężczyzn. Sprzyja temu krótka cewka moczowa oraz mała odległość między odbytem, a ujściem cewki moczowej. ZUM u kobiet sprzyja również aktywność seksualna (podczas stosunku bakterie mogą wnikać do cewki moczowej) oraz stosowanie środków prezerwacyjnych (ułatwiających wprowadzenie bakterii do cewki moczowej).

DZIECI: to druga najczęściej narażona na infekcje układu moczowego grupa. Zakażenie układu moczowego u dzieci jest drugą pod względem zapadalności (po infekcji układu oddechowego) chorobą wieku dziecięcego. Ze względu na nieswoiste objawy, ZUM pozostaje w wielu przypadkach nieleczone, co może prowadzić do groźnych powikłań. Infekcje układu moczowego u dzieci powinny być leczone antybiotykiem, dlatego tak istotne jest wczesne zdiagnozowanie i rozpoczęcie terapii.

4. CZY WYKONANIE TESTU WYMAGA SPECJALNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓBKII MOCZU?

Test można prosto wykonać zanurzając końcówkę paska w moczu zebranym do dołączonego do opakowania pojemnika. Natomiast przy wykonywaniu oznaczenia z moczu należy kierować się takimi samymi zasadami, jakie stosuje się, gdy mocz jest oddawany do badania w laboratorium analitycznym.

Do badania należy wykorzystać próbkę moczu pochodzącą ze środkowego strumienia, najlepiej z pierwszej, porannej zbiórki, po całonocnej (co najmniej 4-godzinnej) przerwie w oddawaniu moczu. W przypadku zbierania moczu do pojemnika należy zwrócić uwagę, aby pojemnik był czysty i suchy. Badanie powinno być wykonane w ciągu 1 godziny od pobrania moczu.

Aby badanie moczu było wiarygodne i obiektywne, przed pobraniem próbki należy unikać spożywania pokarmów zawierających barwniki oraz leków zmieniających zabarwienie moczu. W dniu poprzedzającym badanie nie należy wykonywać ciężkiego wysiłku fizycznego, jak również unikać wysokobiałkowej diety, nie zażywać witaminy C, B2. W przypadku kobiet nie należy pobierać moczu podczas krwawień miesięcznych, jak też 2 - 3 dni przed spodziewaną miesiączką i tuż po jej zakończeniu.

5. CZY TEST JEST BEZPIECZNY?

Test jest całkowicie bezpieczny i nieinwazyjny, prosty w wykonaniu, nie wymaga zastosowania żadnej aparatury, a wynik uzyskuje się już w czasie 2 minut.

6. CZY WYNIK ODCZYTANY PO 2 MINUTACH JEST WIARYGODNY?

Wynik odczytany po 2 minutach nie jest wiarygodny. Wynik należy odczytać w 2 minucie.

7. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYNIKU POZYTYWNEGO?

Należy pamiętać, że pozytywny wynik nie oznacza, że wszystkie 4 substancje zostały wykryte w moczu. Nawet jeśli wynik jest pozytywny tylko dla jednego z nich, a przyczyną nie jest zakażenie dróg moczowych, zaleca się skonsultować z lekarzem.

8. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYNIKU NEGATYWNEGO?

Należy pamiętać, że wynik testu jest ujemny tylko wtedy, gdy wynik w polu testowym dla wszystkich czterech substancji jest ujemny. Jeśli nadal odczuwane są objawy sugerujące zakażenie układu moczowego, zaleca się skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:


DIATHER sp. z o.o sp.k.
Twarda 1/14
00-114 Warszawa

Galeria

Zawartość zestawu



Schemat użycia

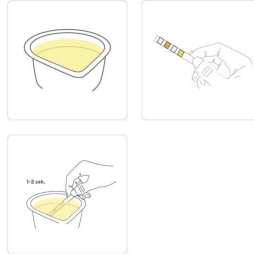

Interpretacja wyników

